

ebrich hipp-dent elektromos fogreszelő lovaknak

A fogreszelőt kizárólag szakképzett személyzet használhatja.

Ellenőrizze a hálózati feszültséget megfelel-e a címkén feltüntetettnek.

Ajánlott a csatlakoztatott készüléket a konnektorba egy 30 mA-megszakítóval védeni.

A kábel és a csiszolókorong épségét minden használat előtt ellenőrizze.

Tartsa a kábelt a hőtől, olajtól és éles szélektől távol és győződjön meg arról, hogy a kábel nem károsodott. Ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel.

Használati útmutató

A torlódásának és a túlzott felmelegedése elkerülése érdekében javasolt a tompa, kopott csiszolókorongok időbeni cseréje. (Különösen a magasabb sebességtartományban.)

Ellenőrizze rendszeresen a csiszolófej hőmérsékletét.

A meghajtó egységet használat után tiszta, száraz ruhával tisztítsa meg a portól, szennyeződéstől.

A gépet soha nem folyadékban (víz, stb) mossa.

A keményedés elkerülése érdekében a köszörűt minden egyes kezelés után a mellékelt réz kefével meg kell tisztítani..

Győződjön meg arról, hogy semmiféle folyadék vagy gőz nem jut a készülék belsejébe!

Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Azokon a területeken, ahol robbanás veszélye áll fenn, a fogreszelőt nem szabad használni.

Minden egyes használat előtt a készüléket és a kábel meg kell vizsgálni esetleges mechanikai sérüléseket keresve.

Amennyiben sérülés gyanúja merül fel az egységet a gyártóval ellenőriztesse. A javításokat csak a gyártó végezheti.

Nem kísérelje meg javítani. A szakszerűtlen használatból vagy javításból adódó hibák a garancia elvesztésével járnak.

Sebesség táblázat
(fordulat/perc)

Forgatógomb	Zárás nélkül	Zárással
A	1.600	1.100
B	1.800	1.400
C	2.000	1.600
D	2.200	1.800
E	2.350	2.050
F	2.420	2.250
G	2.500	2.400

Kizárólag eredeti, gyári korongokat használjon a készülékhez!