

AESCULAP

Fontos információ az **SLS applikátor** sebészeti eszközök használatáról és kezeléséről

Figyelem:

Kérjük olvassa el a tájékoztatót figyelmesen. A nem megfelelő kezelés és használat az eszköz idő előtti elhasználódásához vezethet.

Új eszköz előzetes kezelése:

Minden eszközt meg kell tisztítani a sterilizálás előtt az első alkalommal. Az applikátor autokláv sterilizálásra kifejlesztve, de STERRAD® és STERIS® módszerrel is sterilizálható. Nézze meg a gyártó ajánlását a sterilizálási eljárásokról rozsdamentes eszközök esetében.

Inspekció és funkcionális ellenőrzés:

Nagyon fontos, hogy használat előtt minden sebészeti eszközt vizsgáljon át törést, repedést vagy bármilyen malfunkciót keresve. Különösen fontos a mozgatható részek és a pofák vizsgálata. **NE HASZNÁLJON SÉRÜLT ESZKÖZT.** Sose próbálja megjavítani az eszközt saját maga vagy nem szakképzett szerelő segítségével.

Dekontamináció, tisztítás és karbantartás:

Minden sebészi eszközt fertőtleníteni és alaposan meg kell tisztítani használat után. Tisztítsa meg, vizsgálja meg és teszteljen le minden eszközt. Sterilizálja az összes eszközt műtét előtt. Az alapos tisztítás és karbantartás meghosszabbítja az applikátor életét. Különösen a pofákra ügyeljen. Tisztítás és sterilizálás során az applikátor legyen nyitott állapotban.

Figyelem:

Ne használjon korrózív tisztítószereket. A tisztító és lemosó szerek neutrális (pH 7,0) vagy aközeli legyen

Ne használjon koptató hatású tisztítókat

Kizárólag puha keféket használjon

Alaposan öblítse el desztillált vízzel

Készítse elő sterilizálásra

Tisztítás és öblítés után szárítsa meg az eszközt teljesen és gondosan, sűrített levegővel

Standard sterilizálási eljárások:

Gőz autokláv sterilizálás javasolt. Ne sterilizálja az applikátort hőlégmentes sterilizátorban. Standard autokláv ciklus: 134°C 18 percen át. Más idő és gőz hőmérsékleti ciklus is használható. Azonban, minden eltérést a javasolt időtől és hőmérséklettől validálni kell. Az autokláv hőmérséklete ne haladja meg a 137°C-t.

Kezelés:

Minden sebészeti eszközt a legnagyobb gonddal kell kezelni, tisztítani, sterilizálni és biztonságosan tárolni.

Garancia:

1 év. Minden termék mentes anyag és kivitelezési hibától 1 év garanciával. A gyártó nem vállal felelőséget a nem megfelelő használatból eredő hibákra valamint azokra az eszközökre amelyek eredetétől bármiben elérő változtatásokat eszközöltek.

Gyártó: ITM S/A- indústria de Tecnologias Médicas

Rua Berto Círio 751, Canoas, Brazil – www.edlo.com.br CE Mark

Gyártva az AESCULAP részére

STERRAD® : ©Advanced Sterilization Products 2002

STERIS®: © 1998-2003, Steris Corporation. Minden jog fenntartva.