

SLS-Clip

titán hemosztatikus klip

A használati utasításban foglaltak nem megfelelő követése súlyos sebési következményekkel járhat.

Fontos: Ez a kis papír a hemosztatikus klipek használatára nyújt segédletet nem pedig a sebészeti technikák leírása.

Etilénoxiddal sterilizálva

Nem újra-sterilizálható

Használat előtt ellenőrizze a csomagolást. A sterilitás nem garantált, ha a csomagolás nyitott vagy sérült

Nem tartalmaz latex-et

Egyszeri használatra

YYYY-MM : lejárati idő (Év-Hónap)

LOT: Lot No: gyártási szám

Kövesse a használati utasításban foglaltakat

Kiszerezés:

J1180-1	Kis klip: 30x6 db	Sárga kliptartóban
L5180-1	Kicsi-Közepes klip: 30x6 db	Lila kliptartóban
B2180-1	Közepes klip: 30x6 db	Kék kliptartóban
V3120-1	Közepes-Nagy klip: 20x 6 db	Zöld kliptartóban
O4120-1	Nagy klip: 20x6 db	Narancs kliptartóban

Indikáció:

A titán hemosztatikus klip kifejezetten a véredények vagy szövetek biztonságos megragadására és teljes, atraumatikus zárására lett kifejlesztve. A felhasználó a megfelelő méretet kell kiválasztania a az eljáráshoz, hogy a kívánt szövetet teljesen körbeölelje a klip.

Figyelem:

Ez a klip nem használható a petevezeték elkötésére.

Alacsony mágnessége következtében biztonságosan használható MR vizsgálat során. Pozicionális hibák és műtermékek növekedhetnek a statikus mágneses mező erősségével. A műtermék mérete változhat az MR pulzus szekvenciával.

A titán klip biológiailag inert és szövődmény nélkül in vivo maradhat

Használati utasítás:

Vizsgálja meg a sterilitást biztosító csomagborítást használat előtt

Nyissa ki a steril csomagot

Távolítsa el a termék aljáról és helyezze stabil felületre a ragadós alját

Válassza ki a megfelelő applikátort (színkódos)

Tartsa az applikátort függőlegesen és helyezze a műanyag klip tartó dobozba a klip kivételéhez és közben ne nyomja össze az applikátor két szárát

Nyomja teljesen le a dobozba az applikátor végét majd húzza ki a klippel együtt

Helyezze az applikátor végét a klippel a leszorítani kívánt érhez

Erősen nyomja össze az applikátor nyeleit a klip zárásához. A klipnek először a végei záródnak, ezzel megakadályozva hogy az ér kicsússzon a teljes záródás előtt

Engedje el a szorítást és húzza vissza az applikátort

Figyelmeztetések:

Az időelőtti zárás vagy elengedés elkerülése végett:

Ne fogja az applikátor mindkét száránál fogva amikor a klipet kiveszi a tartóból

Ne nyomja össze az applikátor két szárát mielőtt az ér köré helyezné az applikátort

Amikor a klipet felhelyezi az applikátort jól zárja össze

Vizsgálja meg a lekötési területet, hogy megbizonyosodjon a biztonságos applikálásról és hemosztázisról.

Az applikátor pofák sérülésének megakadályozására:

Mindig függőlegesen helyezze be az applikátort a kliptartóba.

Minden használat előtt ellenőrizze az applikátort és a fogó részt.

Csak a javasolt applikátort használja.

Nyissa ki az applikátort teljesen a tisztításhoz és sterilizáláshoz

Tárolás:

A bontatlan csomagokat jól szellőző, száraz helyen tárolja, extrém hőmérsékletű és nedvességtartalmú helyektől távol.

Szavatosság:

A csomag tartalma steril amennyiben bontatlan csomagolásban van, sérülésmentes és a csomagon jelzett lejáratí időn belül van.

Ez a klip egyszeri használatra van tervezve és nem sterilizálható újra.