

A Fehér MOMOSAN® habzivacs az állatorvosi praxisban


Alkalmazható minden seb esetén lovagnál, szarvasmarhánál, juhoknál, sertéseknél, kutyáknál, macskáknál, vad- és kisállatoknál egyaránt.

- Felületes vagy mély sebeknél
- Sebeknél, melyeknél tasak képződött ill. nyílások vagy fisztulák alakultak ki
- Friss műtéti sebek fedésére vagy műtéti sebek nem megfelelő gyógyulásánál
- Krónikus sebeknél
- Fertőzött sebeknél, tályogoknál
- Traumás eredetű sebeknél, szúrt és vágott sebeknél, égési sérüléseknél
- A bőr leválása esetén
- A talus, a tarsus és a carpus sérüléseinél
- Sérülések esetén sarjszövet kialakulásának megakadályozására

A Fekete MOMOSAN® habzivacs az állatorvosi praxisban

Alkalmazható önmagában vagy a fehér MOMOSAN® habzivaccsal együtt. Elsősorban mechanikai sebtisztításra illetve fokozott váladékozás kezelésére ajánlott (nyílt széptikus vagy mély gennyes sebek esetén). Használható továbbá kötések alapárnázására vagy akár ketrecek kibélelésére is.

Sebkezelés

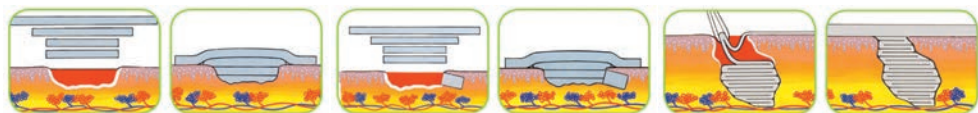

A megfelelő használat érdekében olvassa el a termék melletti tájékoztatót.

Varrateltelenség kutyánál



Végtagsérülés lónál




A GYÓGYÍTÓ SZIVACS

A MOMOSAN® habzivacs tulajdonságai

Krónikus és fertőzött sebek kezelésére alkalmas poliuretán habzivacs, melynek hatékonysága különleges szerkezetének köszönhető. A nyitott pórusok a váladék felszívására és mechanikai sebtisztításra egyaránt használhatók. Alkalmazása egyszerű és nem ragad a sebhez.


A MOMOSAN® habzivacs nem tartalmaz hatóanyagot, így bármilyen sebtisztító folyadékkal együtt használható. Nem allergizál, nem citotoxikus. Fokozza a vérátáramlást, elősegíti a sejtmigrációt és a neovaszkularizációt. Nagyon magas páraáteresztő-képességgel rendelkezik.

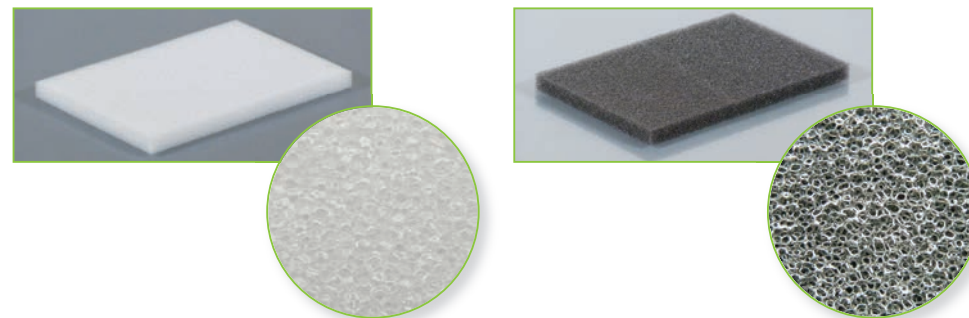

A MOMOSAN® habzivacs hatásmódja

Hatásmódja lényegében a különleges szerkezetének fizikai tulajdonságain alapszik:

- Nyomáscsökkentés
- Mikrostimuláció
- Abszorbeálóképesség
- Szabályozott felszívóhatás

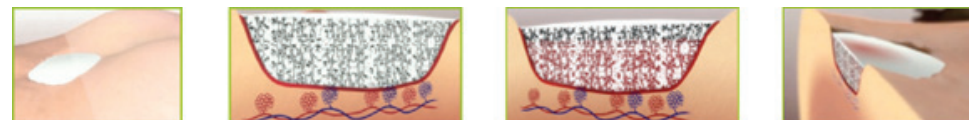

A MOMOSAN® habzivacs alkalmazásának lehetőségei

I. Sebtisztítás

- Különleges szerkezetének köszönhetően kifejezetten alkalmas mechanikai sebtisztításra. A vágási élek mentén a járatok felveszik a váladékot, az egyenetlen fel-szín segítségével fájdalommentesen távolíthatók el az elhalt szövetrészek és az erősen tapadó felrakódások.
- A felrakódástól függően a lágyabb fehér vagy a szilárdabb fekete habzivacs is választható.
- Nagy mennyiségű váladék termelődése esetén plusz réteg fehér MOMOSAN® habzivacs helyezhető fel.



II. Tamponálás

III. Drain

- A keskeny, hosszabb szivacsforma a sebre helyezve drain-ként felveszi a termelődött sebváladékot.


A MOMOSAN® habzivacs előnyei

- Könnyen használható
- Sterilizálható
- Méretre vágható
- Sokrétűen felhasználható
- Kedvező árú
- Gazdaságosabb alternatíva negatívnyomás-terápiához




A MOMOSAN® habzivacs fajtái

Fehér MOMOSAN® habzivacs

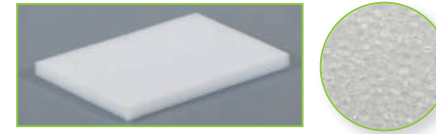

- Poliuretán habzivacs mikrotubulus-szerű szerkezettel, mely különleges kialakításának köszönhetően képes a váladékot gyorsan felvenni és elvezetni, elősegítve ezáltal a sebkörnyék egyensúlyba kerülését.
- Felfekvések esetén kiváló profilaktikus hatással bír.
- A fehér MOMOSAN® habzivaccsal elvégezhető a kíméletes, mechanikai sebtisztítás.

Fekete MOMOSAN® habzivacs

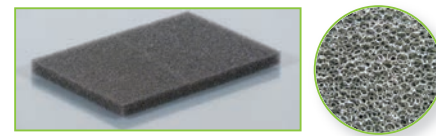

- Poliuretán habzivacs 95%-ban nyitott szerkezettel.
- Folyadék felvételére alkalmas (folyékony gyógyszerformák: emulziók, oldatok vagy szuszpenziók).
- A fekete MOMOSAN® habzivacs mechanikai sebtisztítóként is alkalmazható.

MOMOSAN® habzivacs kötszer, habzivacs Drain



- Poliuretán habzivacs, mely kötszerként vagy drain-ként is alkalmazható.
- Méret: 200 cm x 2,5 cm x 0,3 cm