

Használati utasítás - Kutyafogó rúd hurokkal (merev póráz)

A bot állatorvosi végén található fekete pöcköt kifelé húzva a kötélt előre tolható a botban és ezáltal a hurok mérete a kívánt hosszra állítható



A bot közepén található karikát húzva tartva a hurokrögzítő csap nyitódik és a hurok beakasztható a pecekbe



A bot állatorvosi végén a kötelet meghúzva a hurok szűkül

A bot közepén található karikát meghúzva a hurok kioldódik

