

ECO-MATIC® prémium minőségű műanyag tömegoltó pisztoly a HSW-től

automata fecskendő injekciók beadására

flakontartóval

1 ml űrtartalom

- A) ergonomikus fogó
- B) műanyag henger, flakontartó csatlakozóval
- C) ellenálló műanyag flakontartó
- D) fém tű csatlakozó, Luer Lock
- E) dózis állító

Használati utasítás

Az ECO-MATIC® automata fecskendő folyamatos használatra lett tervezve, csupán az O-gyűrűt és a hengert lehet szükséges cserélni.

A fecskendőt minden használat előtt ki kell tisztítani. Kérjük kövesse a gyártó javaslatát a tisztításra és fertőtlenítésre vonatkozóan.

1) A tű felhelyezése

Figyelem! Saját biztonsága érdekében a védőkupakot tartsa a tűn (egyszer használatos tűk esetében) a használat előtt.

Helyezze rá a tűt a Luer Lock csatlakozóra és rögzítse a tűt az óramutató járásának megfelelően csavarva.

Levétel az ellenkező irányban.

2) A flakon csatlakoztatása

1. Szűrje át az üveg gumidugóját egy steril tűvel mielőtt csatlakoztatná az üveget a tömegoltó tűskéjéhez.

2. Helyezze az üveget a flakontartóba.

3. Az üveget enyhén forgatva nyomja a gumidugó közepébe a tűskét.

3) Flakoncsere

Húzza ki az üveget a tartóból. A palack megfogást segítettően a palacktartó mindkét oldalán található egy-egy rés.

4) A dózis beállítása

Csavarja az adagolót óramutató járásának megegyezően vagy ellenkezőleg mígnem a dugattyú elejét a hengeren jelölt kívánt dózusra nem igazította.

5) Töltés

1. Távolítsa el a védőkupakot.
2. Tartsa az ECO-MATIC® tömegoltót enyhén döntve és a levegő felszívásának elkerülése végett figyeljen rá, hogy a tűske mindig a folyadék szintjén belül legyen.
3. Nyomja össze a fogót majd eressze el gyorsan, hogy a folyadék a hengerbe áramolhasson.
4. A légbuborékok eltávolításához ismételje meg a lépést.
5. A fecskendő töltéséhez és az injekció előkészítéséhez győződjön meg arról, hogy az adagot pontosan beállította és hogy nincs látható buborék a hengerben. Tartsa a fecskendőt felfele és nyomja meg a dugattyút, hogy a légbuborékok kiszabaduljanak.

Használat után

A szermaradványok eltávolításához mossa le a fecskendőt meleg víz és detergens keverékével, majd öblítse le tiszta, meleg vízzel.

Fertőtlenítés

Az ECO-MATIC® automata fecskendőt és a tűket ajánlott minden használat előtt és után fertőtleníteni.

1. Szívjon fel a hengerben meleg vizet egy meleg vízzel töltött üveget csatlakoztatva
2. Függessze fel a teljes ECO-MATIC® automata fecskendőt tűvel együtt egy vízzel teli tartályba és forralja maximum 20 percig.
3. Távolítsa el az ECO-MATIC® automata fecskendőt a tartályból, csavarja a fogóját tiszta ruhába és pumpálja hogy a vizet eltávolítsa.

Síkosítás

Csavarja el majd távolítsa el a műanyag hengert. Síkosítsa a dugattyút és a műanyag hengert 100%-os tisztaságú, hidegen sajtolt vagy annak megfelelő növényi olajjal.

Kérjük kövesse a gyártó utasításait a használattal kapcsolatban.

Ne használjon ásványi olajat, szilikont, WD-40-et, glicerint vagy alkoholt. A petróleum alapú termékek megkeményítik a dugattyút és az alkatrész élettartalmát rövidítik.