

GYNBag és GYNPipe Szett

MÉHELŐESÉS Kezelésére

Termékismertető

GYNBag és GYNPipe

- A **GYNBag**-et a szennyeződésektől megtisztított, előesett méhtestre kell ráhúzni – ehhez két emberre van szükség. Az állatorvos “bezacskozza” a méhet, a segítő személy pedig feszesen tartja a “zacskót”, vagyis a **GYNBag**-et. A “bezacskozás” által a méh automatikus összemegy és a pangó folyadék a test felé kezd áramlani.
- A **GYNBag** speciális kialakításának köszönhetően nagyon jól illeszkedik a méh/vulva kezdetéhez és a következő lépésben nyitott ököllel óvatosan vissza lehet tolni az előesett méhtestet. Kifejezetten ehhez lett kifejlesztve a kagylóhéyszerű, flexibilis **GYNPipe**, amely egyfajta segítséget nyújt a méh megtartásában és mobilizálásban a repozíció során, vagyis a **GYNBag** és a **GYNPipe** együttes használata ajánlott.
- Számos előnye van a **GYNBag** és **GYNPipe** használatának: a repozíció gyorsabb, egyszerűbb, higiénikusabb és biztonságosabb. Elkerülhető a perforáció annak minden lehetséges kockázatával együtt.
- A **GYNBag** strapabíró polipropilén anyagból készült és egyszeri használatra lett tervezve. Könnyű és kifejezetten szakadásbiztos.
- **A szett tartalma:**
 - 1 db **GYNPipe**
 - 1 csomag **GYNBag**: 3 db “S” és 3 db “L” méretű zacskó (elsőborjas és idősebb tehenek részére)

