

# Bőrkapocs behelyező (stapler)

Ez a használati utasítás a termék használatáról szól, nem a sebészeti technikára vonatkozik.

## Termékleírás

A bőrkapocs behelyező (stapler) egy steril, egyszer használatos eszköz, mely SMI bőrkapcsokat tartalmaz és a bőrseb zárására szolgál.

## FONTOS!


Ez a leírás a bőrkapocs behelyező (stapler) használatához nyújt segítséget, nem a bőrkapocs behelyezés sebészeti technikájának leírására szolgál. A bőrkapocsokkal kapcsolatos eljárásokról, technikákról és komplikációkról kérjük az orvosi szakirodalomból tájékozódjon. A felhasználónak jártasnak kell lennie a sebészeti eljárásokban és technikákban – beleértve a bőrkapocs használatát is – mielőtt bőrseb zárásra alkalmazná a bőrkapocs behelyezőt (stapler).

## Javallatok

A bőrkapocs behelyező (stapler) általános, hasúri, mellkasi, szülészeti és ortopédiai műtétek utáni bőrseb zárására használható.

## Az eszköz részei (sematikus ábra):


- A) Nyél
- B) Kapocs-számláló
- C) Középjelzés

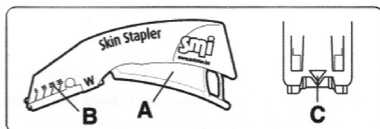

## A bőrkapocs jellemzői


A bőrkapocs behelyező (stapler) „SMI bőrkapocs W” (széles kapcsok)-at tartalmaz.

- 1) Az eredeti bőrkapocs jellemzői
- 2) A behelyezett bőrkapocs jellemzői
- 3) Bőrkapocs zárt állapotban

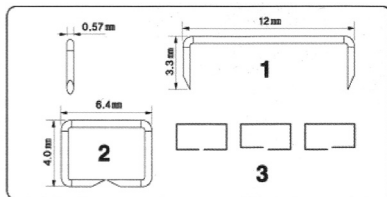


## Használati utasítás

1. Egyenletesen egyesítse a sebszéleket Adson csipesszel vagy más eszközzel.
2. Úgy kell ráhelyezni a sebre, hogy a középjelzés az egyesített sebszélek közepére essen.
3. Teljesen nyomja be a fogantyút, hogy a bőrkapocs megfelelően összefogja a sebszéleket. Ekkor a kapocsbetevőt emelje el a sebszélről. Ismételje a folyamatot – a kapcsokat egyenlő távolságokra behelyezve –, amíg a seb teljes mértékben zárásra kerül. Ha a fogantyút nem teljesen nyomják be, akkor a kapocs nem zár megfelelően, vagy szabálytalan alakban zár. A deformált kapcsokat új kapoccsal kell helyettesíteni.

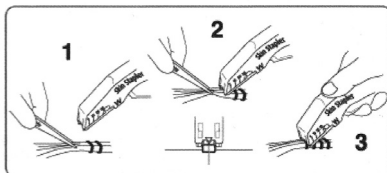

## A behelyezett bőrkapocs eltávolítása bőrkapocs eltávolítóval

1. Helyezze a kapocskiszedő fejének alsó szarát a bőr és a kapocs vízszintes része közé.
  2. Nyomja össze a kapocskiszedő szarait teljesen, majd távolítsa el a kapcsot a bőrből.
- A) A kapocskiszedő szára
  - B) A kapocskiszedő fejének alsó szára
  - C) Eltávolított kapocs

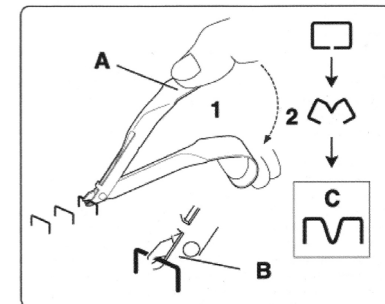

## Ellenjavallatok

Nem használható, ha legalább 5 mm távolság nem biztosítható a bőrkapocs és az erek, belső szervek és csontos részek (pl. koponya) között. Nem használható olyan betegek esetén akik érzékenyek vagy allergiások a rozsdamentes acélban lévő fémekre, pl.: nikkel, króm, réz, kobalt és vas. Nem használható belső szerveken.

## Óvintézkedések

A bőrkapocs behelyezőt az éles tárgyaknak kijelölt tárolóban tartsa.

Csak akkor nyomja össze a fogantyút, ha a szövet kapcsolási zónában csak a megfelelő szövet van, így elkerülhetők a figyelmetlenségből adódó balesetek. Bármilyen idegen anyag jelenléte fokozza a bakteriális fertőzés veszélyét. Szeptikus és kontaminált sebek esetében a drenálásra és sebzárára vonatkozó általános sebészeti gyakorlat szabályait betartva kell alkalmazni. Nagy mennyiségű bőr alatti zsírszövettel takart sebek esetén egyéb intézkedésekre is szükség lehet a bőr lezárásához.

## Mellékhatások

Az alábbi mellékhatások fordulhatnak elő az eszköz használatakor: allergiás reakció a rozsdamentes acélban található fémekre való érzékenység esetében (pl.: króm, nikkel, réz, kobalt és vas), szövethiány a sebnél, fokozott bakteriális fertőzőképesség, minimális szöveti gyulladásos reakció, és fájdalom, ödéma, bőrpír a sebnél.

## Sterilizáció

A termék etilén-oxiddal sterilizált. Ne sterilizálja! Tilos felhasználni, ha a csomagolása fel van nyitva vagy sérült. Egyszer használatos. Egy eszköz több alkalommal történő használata, a sérült vagy nyitott csomagolású kapocsbehelyező alkalmazása, az újrahasznosítás és/vagy az újratesterilizálás az eszköz elégtelen vagy hibás működéséhez vezethet, megnövelheti a kontamináció esélyét, esetleg a páciens megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.

## Jelmagyarázat

- Olvassa el a használati utasítást
- Tárolási hőmérséklet
- Száras helyen tartandó
- Tartsa távol közvetlen napfénytől
- Egyszer használatos
- Ne sterilizálja
- Ne használja, ha csomagolás sérült

- Gyártási dátum
- Lejárat dátum: év- hónap (YYYY-MM)
- Gyártási szám
- Katalógus szám
- Etilén-oxiddal sterilizálva
- Megfelelőségi jelölés. A termék megfelel a 93/42/EEC orvosi műszerekről szóló direktíva alapvető követelményeinek.